




**Buyse Medical
Supplies & Services**

Tel : 0498/248.197

Gebruiksaanwijzing Traagschuimmat voor Trendelenburgpositie

Kit wegwerpmatras cm 90x52x3 cm met toebehoren (SO02815V), antislipbodem (SO02815S).

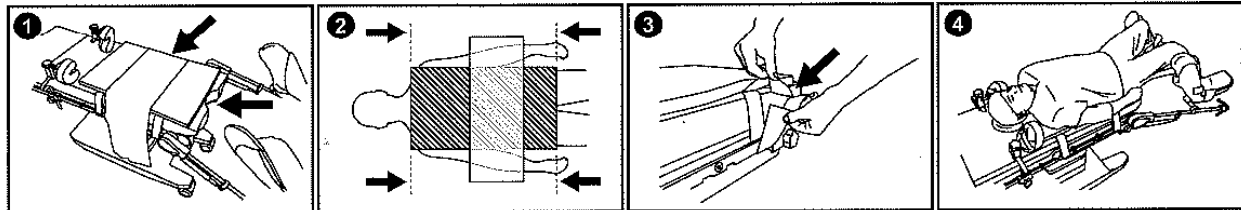

1. Leg de wegwerpmatras direct op de operatietafel. (figuur 1)
2. Lijn de onderkant van de matras uit met die van de operatietafel (fig. 2)
3. Plaats, indien aanwezig, de spunlace-stof (SO02W815) tussen de matras en de huid van de patiënt, en gebruik het om de armen te fixeren en ervoor te zorgen dat ze dicht bij het lichaam van de patiënt blijven.
4. Verbind de matras met de operatietafel met behulp van 4 banden zoals afgebeeld (fig. 3) (alleen beschikbaar bij SO02815V)
5. Controleer de juiste positionering van de patiënt op de matras voordat u met de operatieprocedures begint (afb. 4)

BELANGRIJK – de huid van de patiënt moet in direct contact met de matras zijn om te voorkomen dat je uit de Trendelenburg glijdt. Plaats de armen zoals afgebeeld, of volgens het ziekenhuis-positioneringsprotocol.

Fixeer, indien aanwezig, de veiligheidsriemen (SO02815B8) ter hoogte van de borst van de patiënt. (Veiligheidsriemen kunnen afzonderlijk besteld worden)

ATTENITON:	
	NON-STERILE
	Disposable
	Trendelenburg inclinations: SO02815DVG52 25° SO02815V AND -S 30° SO02815V AND -S UP TO 45° with extra accessories
	Trendelenburg Use ONLY
	Latex Free



Medical Device

